

Zusammenfassung der Merkmale des Mittels (§ 21 Abs. 2 Tierimpfstoff-VO)

1. **Bezeichnung des Mittels:**

virotype CSFV RT-PCR Kit

Kurzform der Bezeichnung: virotype CSFV

2. **Bestandteile des Mittels nach Art und Menge, gebräuchliche oder chemische Bezeichnung:**

	24 Reaktionen	96 Reaktionen
Master Mix (Master-Mix, orangefarbener Deckel), enthält Enzyme, Primer und Sonden	500 µl	2 x 980 µl
Positiv Control (Positivkontrolle, roter Deckel)	25 µl	150 µl
Negative Control (Negativkontrolle, blauer Deckel)	25 µl	150 µl

3. **zu verwendendes Untersuchungsmaterial, Zieltierart:**

Blut, Gewebe, Tupferproben und konservierende Transportmedien von Schwein und Wildschwein

4. **Art der Anwendung, Anwendungsgebiete:**

In-vitro-Diagnostikum für Schweine; Real-time RT-PCR Kit zum Nachweis der RNA des Virus der Klassischen Schweinepest in Blut, Gewebe, Tupfern und konservierenden Transportmedien von Schwein und Wildschwein

5. **Gegenanzeigen:** keine

6. **Hinweise für die sachgerechte Anwendung:**

Den Test sollten nur für Labortätigkeit qualifizierte und speziell geschulte Personen ausführen. Die Bestandteile des Testkits dürfen nicht verunreinigt und nicht mit Bestandteilen aus anderen Chargen vermischt werden. Probenvorbereitung und Amplifikation sollten in getrennten Räumlichkeiten stattfinden. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für das Arbeiten in Laboratorien und halten Sie die Regeln der Good Laboratory Practice (GLP) ein. Die Einhaltung des vorgeschriebenen Protokolls ist unbedingt erforderlich.

7. **Hinweise für den sicheren Gebrauch:**

Bei sachgerechtem Umgang besteht kein Risiko für Mensch und Tier. Alle Kit-Komponenten sind nicht infektiös. Der PCR-Mix enthält Natriumazid (NaN_3) in einer Konzentration von 0,05 %. Natriumazid ist ein Gefahrstoff: Sehr giftig beim Verschlucken, entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase (R28-32-50/53, S28-45-60-61). Natriumazid ist in einer Zubereitung mit einer Konzentration unter 0,1 % gemäß Richtlinie 199/45/EG (Gefahrstoffzubereitungen) nicht mehr kennzeichnungspflichtig.

8. **Verfallsdatum, soweit erforderlich auch nach erstmaliger Öffnung des Behältnisses:**

Die Reagenzien sind nach Erhalt sofort bei -15°C bis -30°C lichtgeschützt zu lagern. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung ist der Kit bis zum angegebenen Verfallsdatum (siehe Verpackungsetikett) haltbar.

9. **Hinweise zur Aufbewahrung:**

Lagerung des gesamten Testkits bei -15°C bis -30°C und lichtgeschützt.

10. **Hinweise zur Beseitigung nicht verwendeter Mittel:**

Die Reste von nicht verwendeten Kit-Komponenten sind als Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden, Abfallschlüssel 180203 nach Abfallverzeichnis-Verordnung zu entsorgen. Kit-Schachtel und Druckverschlussbeutel sind als Verpackungen aus Kunststoff, Abfallschlüssel 150102 nach Abfallverzeichnis-Verordnung zu entsorgen.

11. **Name oder Firma und Anschrift des Zulassungsinhabers:**

INDICAL BIOSCIENCE GmbH
Deutscher Platz 5b
D-04103 Leipzig

12. **Zulassungsnummer:**

FLI-B 517

13. **Datum der Erteilung der erstmaligen Zulassung oder der Verlängerung der Zulassung:**

17.08.2010, unbefristet verlängert

14. **Datum der Überarbeitung der Zusammenfassung der Merkmale des Mittels:**

26.03.2021