

## Zusammenfassung der Merkmale des Mittels (§ 21 Abs. 2 Tierimpfstoff-VO)

### 1. **Bezeichnung des Mittels:**

Kylt IVA beta RTU Real-Time RT-PCR Detektionskit zum Nachweis von Influenzavirus Typ A  
Kurzform der Bezeichnung: Kylt IVA beta RTU RT-qPCR

### 2. **Bestandteile des Mittels nach Art und Menge, gebräuchliche oder chemische Bezeichnung:**

Reagenzien	25 Reaktionen	100 Reaktionen
RTU-Mix (brauner Deckel)	450 µl	4 x 450 µl
Positivkontrolle (roter Deckel)	2 x 50 µl	4 x 50 µl
Negativkontrolle (blauer Deckel)	1 ml	1 ml

### 3. **zu verwendendes Untersuchungsmaterial, Zieltierart:**

Gewebe- und Organproben (z. B. Trachea, Lunge, Zäkaltonsillen), Tupferproben (z. B. Nasal-, Tracheal- oder Kloakentupfer), Speichel- und BAL-Proben (BALF/bronchoalveolar lavage fluid, nur Schwein), Kotproben und Probenmaterial kultureller Anzuchten der vorgenannten Proben (z. B. Zellkulturüberstand, Allantoisflüssigkeit) vom Geflügel, Schwein und Pferd

### 4. **Art der Anwendung, Anwendungsgebiete:**

*In-vitro*-Diagnostikum für Tiere; Real-Time RT-PCR Detektionskit zum Nachweis von Influenzavirus Typ A in Gewebe- und Organproben (z. B. Trachea, Lunge, Zäkaltonsillen), Tupferproben (z. B. Nasal-, Tracheal- oder Kloakentupfer), Speichel- und BAL-Proben (BALF/bronchoalveolar lavage fluid, nur Schwein), Kotproben und Probenmaterial kultureller Anzuchten der vorgenannten Proben (z. B. Zellkulturüberstand, Allantoisflüssigkeit) vom Geflügel, Schwein und Pferd

### 5. **Gegenanzeigen:** keine

### 6. **Hinweise für die sachgerechte Anwendung:**

Die Gebrauchsinformation ist zu beachten.

Das Mittel wird von speziell geschultem Personal in für diesen Zweck vorgesehenen Laboratorien angewendet. Alle Proben werden als potentiell kontaminiert betrachtet. Die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen für das Arbeiten in Laboratorien sind zu beachten und alle Arbeiten nach den Regeln der „Good Laboratory Practice (GLP)“ durchzuführen.

Die Probenvorbereitung sollte von allen nachfolgenden Prozessschritten räumlich getrennt stattfinden. Komponenten verschiedener Chargen dürfen nicht zusammen verwendet werden. Nach Ablauf des Verfallsdatums sind das Mittel und seine Einzelreagenzien nicht mehr einzusetzen.

### 7. **Hinweise für den sicheren Gebrauch:**

Bei sachgerechtem Umgang besteht kein Risiko für Mensch und Tier. Alle Kit-Komponenten sind nicht infektiös und gemäß Richtlinie 199/45/EG (Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen) keinen Gefahrenklassen zuzuordnen.

### 8. **Verfallsdatum, soweit erforderlich auch nach erstmaliger Öffnung des Behältnisses:**

Bei vorschriftsmäßiger Lagerung sind die Reagenzien bis einschließlich des angegebenen Haltbarkeitsdatums verwendbar (siehe Etikett des Umkartons des Mittels).

### 9. **Hinweise zur Aufbewahrung:**

Das nicht angebrochene Mittel bzw. dessen Komponenten sind bei einer Temperatur  $\leq -18^{\circ}\text{C}$  zu lagern. Wiederholte Einfrier-Tauzyklen sind zu vermeiden, siehe auch Gebrauchsinformation.

10. **Hinweise zur Beseitigung nicht verwendeter Mittel:**

Für die Reste von nicht verwendeten Reagenzien sind an Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen zu stellen.

11. **Name oder Firma und Anschrift des Zulassungsinhabers:**

SAN Group Biotech Germany GmbH  
Mühlenstr. 13  
D-49685 Höltinghausen

12. **Zulassungsnummer:**

FLI-C 069

13. **Datum der Erteilung der erstmaligen Zulassung oder der Verlängerung der Zulassung:**

26.06.2019

14. **Datum der Überarbeitung der Zusammenfassung der Merkmale des Mittels:**

31.07.2023