

Zusammenfassung der Merkmale des Mittels (§ 21 Abs. 2 Tierimpfstoff-VO)

1. **Bezeichnung des Mittels:**

ADIALVET BTV TYPE 3 REAL TIME

2. **Bestandteile des In-vitro-Diagnostikums nach Art und Menge, gebräuchliche oder chemische Bezeichnung:**

Reagenzien	100 Reaktionen
Amplifikationslösung (A5), grüner Deckel	2 x 1 ml
BTV Serotyp 3-Positivkontrolle (BTV T3 CTL+), lilafarbener Deckel, lyophilisiert	200 µl
Resuspensionspuffer CTL+ (PCR Buffer), weißer Deckel	1 ml

3. **zu verwendendes Untersuchungsmaterial, Zieltierart:**

EDTA-Blut und Gewebeproben von Rind, Schaf, Ziege, Hirschen und Kameliden; Einzelprobe oder Pool-Analyse bis zu 10 Proben

4. **Art der Anwendung, Anwendungsgebiete:**

In-vitro-Diagnostikum für Tiere; Real-time RT-PCR zum Nachweis des Blauzungenvirus (Serotyp 3) in EDTA-Blut und Gewebeproben von Rind, Schaf, Ziege, Hirschen und Kameliden

5. **Gegenanzeigen:** keine

6. **Hinweise für die sachgerechte Anwendung:**

Wir empfehlen, nur ausreichend geschultes Personal diesen Test durchführen zu lassen. Die Qualität der Ergebnisse hängt vom strikten Einhalten der Regeln für Gute Laborpraxis ab. Überprüfen Sie die Genauigkeit und Richtigkeit der benutzten Mikropipetten. Dem Anwender wird empfohlen, die Probenvorbereitung und die Amplifikation in zwei getrennten Räumlichkeiten durchzuführen.

7. **Hinweise für den sicheren Gebrauch:**

Bei sachgerechtem Umgang besteht kein Risiko für Mensch und Tier. Alle Kit-Komponenten sind nicht infektiös. Die zu analysierenden Proben müssen wie biologischer Abfall behandelt und entsorgt werden. Ergreifen Sie die notwendigen Maßnahmen für die Sicherheit und Nichtverbreitung, die für die Handhabung der betroffenen biologischen Stoffe erforderlich sind.

8. **Verfallsdatum, soweit erforderlich auch nach erstmaliger Öffnung des Behältnisses:**

Nach dem Eingang des Kits müssen die Amplifikationslösung „A5“, der „PCR Buffer“ und die „BTV T3 CTL+“ bei <-15 °C lichtgeschützt gelagert werden. Das Kit ist bis zum angegebenen Verfallsdatum (24 Monate) haltbar.

9. **Hinweise zur Aufbewahrung:**

Lagerung des gesamten Testkits bei <-15 °C und lichtgeschützt.

10. **Hinweise zur Beseitigung nicht verwendeter Mittel:**

Sämtliches Material, das mit den zu testenden Proben in Berührung kam, sollte als Abfall aus Forschung, Diagnose und Vorsorge bei Tieren entsorgt werden, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden. Die äußeren Verpackungen (Kartons) benötigen keine spezielle Entsorgung.

11. **Name oder Firma und Anschrift des Zulassungsinhabers:**

Bio-X Diagnostics S.A.
38, rue de la Caléstienne
BE-5580 Rochefort

Hersteller:

ADIAGENE S.A.S.
9, rue Gabriel Calloët-Kerbrat
F-22440 Ploufragan

12. **Zulassungsnummer:**

FLI-C 153

13. **Datum der Erteilung der erstmaligen Zulassung oder der Verlängerung der Zulassung:**

22.01.2025

14. **Datum der Überarbeitung der Zusammenfassung der Merkmale des Mittels:**

03.03.2025